



# Nasaly

## NEZ BOUCHÉ

### Dispositif médical

Veillez lire **attentivement** cette notice avant d'utiliser ce produit car elle contient des informations importantes pour vous. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d'autres questions, demandez à votre médecin ou votre pharmacien ou contactez le numéro 0 800 941 452.

### INDICATION

Nasaly aide à soulager le nez bouché dû au rhume, à la rhinosinusite chronique ou à la rhinosinusite allergique. Il agit grâce à un mécanisme d'action naturel.

Nasaly est une combinaison unique de :

- Solution saline hypertonique concentrée à 3% qui aide à déboucher le nez de manière naturelle (en se basant sur le mode d'action)
- ProVitamine B5 contribue à l'hydratation
- Parfum rafraîchissant
- Huiles essentielles de thym et d'eucalyptus, ainsi que du menthol, d'origine 100 % naturelle.

Sans conservateur.

Le produit aide également à éliminer les virus et les bactéries du nez.

Adultes et enfants à partir de 12 ans.

### COMPOSITION

Eau\* (93,86%), chlorure de sodium\* (3,05%), dexpanthénol (ProVitamine B5), PEG-40 huile de ricin hydrogénée, phosphate monopotassique, phosphate dipotassique, huile essentielle d'eucalyptus\*, menthol\*, huile essentielle de thym\*, acétate d'isobornyl, acétate de bornyl.

\*97 % des ingrédients d'origine naturelle : Eau, chlorure de sodium, huile essentielle d'eucalyptus, menthol, huile essentielle de thym.

### MODE D'EMPLOI

Avant la première utilisation, retirez le capuchon de protection, tenez la bouteille droite dans votre main et amorcez la pompe (dans un mouchoir) en appuyant fermement plusieurs fois jusqu'à ce que la solution commence à sortir de l'ouverture. Le dispositif est maintenant prêt à être utilisé.

1. Mouchez doucement votre nez pour le débarrasser du mucus avant d'utiliser le produit.
2. Insérez l'applicateur nasal dans la narine et appuyez sur la pompe tout en inhalant doucement. Maintenez la bouteille droite.
3. Effectuez 1 ou 2 pulvérisations dans chaque narine jusqu'à deux fois par jour.
4. Nettoyez l'embout après chaque utilisation et remplacez le capuchon de protection.



5. Après une période de stockage de plus d'une semaine, amorcez à nouveau avant utilisation.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vos symptômes ne s'améliorent pas dans les 5 jours.

#### MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Nasaly est uniquement réservé à l'usage nasal. Les composants de Nasaly peuvent causer des réactions d'hypersensibilité (y compris de l'essoufflement) chez les patients sensibilisés ou une sensation de brûlure dans le nez.

Dans le cas éventuel d'un problème grave suspecté associé à ce produit, arrêtez l'utilisation, consultez votre médecin ou votre pharmacien et signalez-le au fabricant et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

N'utilisez pas ce dispositif médical après la date de péremption indiquée sur l'emballage. Après ouverture, ne conservez pas ce produit pendant plus de 4 semaines. Évitez tout contact avec les yeux. Tenir ce produit hors de la vue et de la portée des enfants. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce dispositif, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. N'utilisez pas ce dispositif pour plus d'une personne, cela pourrait propager une infection. Ne pas dépasser la dose recommandée. Utilisez uniquement selon les instructions. Pour garantir un bon fonctionnement, ne retirez pas l'applicateur et ne détériorez pas l'emballage.

#### NE PAS UTILISER CE PRODUIT :

- Si vous êtes allergique à l'un des ingrédients,
- En cas d'affections des voies respiratoires liées à une hypersensibilité marquée (par exemple un asthme bronchique),
- En cas d'épilepsie,
- Chez les enfants de moins de 12 ans.

#### GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Il est recommandé de consulter votre médecin avant utilisation si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

Flacon avec pompe pour pulvérisation nasale. Ne contient pas de gaz propulseur. Chaque flacon contient 20 ml de solution ce qui correspond à environ 125 pulvérisations. Chaque pulvérisation correspond à environ 0,16 ml de solution.

#### CONDITIONS DE CONSERVATION

☞ Conserver à une température inférieure à 25°C.

☜ Conserver dans l'emballage d'origine.

Après ouverture, ne pas conserver ce produit pendant plus de 4 semaines.

Dernière mise à jour : février 2024



Dispositif médical

🏰 P&G Health France SAS  
18C, Boulevard Winston Churchill  
21000 DIJON  
FRANCE

Distributeur : Laboratoire Vicks  
163-165, Quai Aulagnier  
92600 ASNIERES-SUR-SEINE  
FRANCE

ANAS90PGT019A