

# EAU DE MER Bébé

## HYGIÈNE DU NEZ

### Lave, débouche et hydrate le nez

Le nez est l'organe responsable de l'odorat et agit comme un filtre naturel pour réduire les impuretés de l'air que nous inhalons (poussières, pollens, pollution, germes, fumée, etc...) et conditionner celui-ci avant qu'il n'atteigne les bronches et les poumons.

Quand le nez est sec ou obstrué, il ne peut plus assurer ses fonctions et les impuretés peuvent provoquer des irritations nasales ou favoriser les rhumes, allergies, rhinosinusites, etc... aussi bien chez les bébés, les enfants que chez les adultes.

Pour préserver cette fonction de filtre protecteur naturel des fosses nasales, il est important de garder une muqueuse nasale propre, décongestionnée et hydratée grâce au lavage régulier du nez.

Chez les bébés, l'hygiène nasale est particulièrement importante car leurs mécanismes de défenses sont encore immatures et ils sont plus sujets aux infections et rhumes.

### Qu'est ce que c'est ?

Care+ Eau de mer Hygiène du nez bébé est idéal pour les bébés à partir de 3 mois et les enfants jusqu'à 6 ans. Ce produit est indiqué pour un lavage quotidien du nez ou dès l'apparition des premiers symptômes de rhume, rhinite et sinusite. Solution 100% naturelle pour pulvérisation nasale en flacon pressurisé.

Contient une solution d'eau de mer riche en oligo-éléments marins idéale pour :

- Laver quotidiennement le nez des bébés et des enfants. Son utilisation régulière, même lorsque le nez n'est pas bouché, protège efficacement contre les rhumes et autres complications.
- Décongestionner le nez bouché
- Hydrater les fosses nasales en cas de sécheresse de la muqueuse nasale (exposition à un environnement très sec).
- Éliminer l'excès de mucus. Fluidifie le mucus pour faciliter le mouchage et prévenir l'apparition de complications.
- Prévenir des réactions allergiques.

Care+ Eau de mer Hygiène du nez bébé contient un embout nasal spécialement conçu pour le nez des bébés.

Le conditionnement de Care+ Eau de mer Hygiène du nez bébé permet :

- D'utiliser le flacon dans toutes les positions pour une meilleure facilité d'utilisation.
- D'éviter que le gaz propulseur (air comprimé) ne soit en contact avec la solution et se répande dans les fosses nasales.

### Pour qui ?

Indiqué pour les bébés à partir de 3 mois et les enfants jusqu'à 6 ans.

Pour le lavage quotidien du nez ou dès les premiers symptômes de rhume, rhinite et sinusite. Pour les bébés de moins de 3 mois, consulter votre médecin.

TOUS LES JOURS

100% d'eau de mer naturelle

100% naturel

100% bébé



## Composition

Eau purifiée et eau de mer naturelle. Sans conservateur.

## Conseils d'utilisation

Pour un lavage quotidien du nez :

1 à 2 pulvérisations dans chaque fosse nasale matin et soir.

Dès les premiers symptômes de rhume, rhinite et sinusite :

Renouveler les pulvérisations jusqu'à ce que le nez soit complètement débouché, avec au maximum 6 pulvérisations par jour dans chaque fosse nasale.

Pour une utilisation optimale, merci de lire les instructions suivantes :

- 1- Incliner la tête sur le côté et introduire délicatement l'embout nasal (environ 3 mm) dans la narine
- 2- Exercer une pression brève et rapide
- 3- Laisser agir quelques secondes
- 4- Essuyer le surplus de liquide qui s'écoule de la narine
- 5- Répéter l'opération dans l'autre narine, en penchant la tête de l'autre côté
- 6- Moucher l'enfant avec un mouchoir
- 7- Répéter ces étapes si nécessaire jusqu'à ce que le nez soit complètement propre
- 8- Pour des raisons d'hygiène et pour éviter le risque d'infection, laver l'embout nasal à l'eau après chaque utilisation et le sécher à l'air.

## Précautions

Comme pour tout produit, un risque de réaction allergique existe. En cas de réaction allergique, rincer le nez du bébé ou de l'enfant à se moucher et arrêter d'utiliser ce produit. Des saignements ou une légère douleur après l'utilisation de ce produit peuvent apparaître si la muqueuse nasale est irritée. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

## Précautions d'emploi

Conserver hors de la vue et de la portée des enfants. Ne pas utiliser après la date de péremption qui apparaît sur le flacon. Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Récipient pressurisé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer ce produit à des températures supérieures à 50°C. Ne pas percer ni brûler, même lorsque le flacon est vide. Conserver à température ambiante.


## Autres produits de la gamme Care + Eau de mer

Care+ Eau de mer Hygiène du nez. 125 ml.


Pour les adultes et les enfants à partir de 6 ans. La pression modérée du spray permet un lavage nasal efficace.

Care+ Eau de mer Nez bouché. 125 ml.

Pour les adultes. Procure un soulagement efficace de la congestion nasale. Contient des extraits de plantes reconnues pour leurs propriétés calmantes et hydratantes.

  
Fabricant :  
Laboratoires Chemineau  
93, route de Monnaie  
37210 VOUVRAY (France)

Distributeur :  
EG LABO - Laboratoires EuroGenerics  
Central Park  
9-15 Rue Maurice Mallet  
92130 Issy-Les-Moulineaux  
France

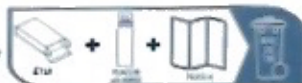

Dernière mise à jour : 2017-07

Date de marquage CE : 2011

AN1386 0003

125 mL

PC-104481-01

